

INHALÁLÓ KÉSZÜLÉK

HELLO KITTY HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ



flang Ltd
29HarleyStreet LONDON, W1G 9QR
UnitedKingdom

Xinyu Electronic Co.,Ltd
No.3, Futian S Rd, Shente Industrial District,
Gangkou Town, Zhongshan, Guangdong, PRC

ECN003

INHALÁLÓ KÉSZÜLÉK

MI A KOMPRESSZOROS INHALÁTOR

A kompresszoros inhalátor egy kompakt orvosi eszköz, amelyet úgy terveztek, hogy hatékonyan juttassa el az orvos által előírt gyógyszereket a hörgő tüdőjáratokba. Megfelelő karbantartás és használat mellett hosszú éveken át megbízható kezelést biztosít. Ezt a terméket az asztma, az allergia és más légzőszervi megbetegedések sikeres kezelésére fejlesztették ki. légáramot hoz létre, amely átlátszó csövön keresztül halad a porlasztóba. Amikor a levegő belép a porlasztóba, az az előírt gyógyszert aeroszolos koncentráttá alakítja át a könnyű belégzés érdekében.

A kompresszoros porlasztót csak engedéllyel rendelkező szakember felügyelete mellett szabad használni.


orvos és/vagy légzésterapeuta felügyelete alatt. Javasoljuk, hogy alaposan olvassa el ezt a kézikönyvet, hogy megismerje a termék funkcióit. A termék rendeltetésszerű használatától eltérő használatát mindig kerülni kell.

FONTOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK


- OLVASSA EL FIGYELMESEN ÉS TEGYE EL EZT A HASZNÁLATI UTASÍTÁST A KÉSŐBBI HASZNÁLATRA.
- Mielőtt a készüléket csatlakoztatja a konnektorhoz, ellenőrizze, hogy a készülék címkéjén szereplő műszaki adatok megfelelnek-e a konnektorban lévő elektromos feszültségnek.
- A készüléket csak megfelelően földelt konnektorba csatlakoztassa.
- Ezt a készüléket beltéri használatra tervezték. Ne használja ezt a készüléket kereskedelmi célokra. Ne használja a készüléket ipari környezetben vagy kültéren!
- Ne használja a készüléket a rendeltetésétől eltérő célra.
- Mindig kapcsolja ki a készüléket és húzza ki a konnektorból, ha felügyelet nélkül hagyja, vagy ha nem használja, illetve tisztítás előtt.
- Az áramütés okozta sérülések elkerülése érdekében ne tisztítsa a készüléket folyó áram alatt
- víz alatt, és ne merítse vízbe vagy bármilyen folyadékba.
- Ügyeljen arra, hogy a tápkábel ne érintkezzen vízzel vagy nedvességgel vagy fűtött felülettel.
- Ne húzza ki a készüléket a hálózati aljzatból a tápkábel meghúzásával. Ez károsíthatja a tápkábelt vagy a hálózati aljzatot. Húzza ki a kábelt a hálózati aljzatból a hálózati kábel dugójának óvatos kihúzásával.
- Ha a hálózati kábel sérült, cseréltesse ki egy műszaki szervizben. a készüléket tilos használni, ha a hálózati kábel vagy a dugó sérült.
- Az áramütés okozta sérülésveszély elkerülése érdekében ne javítsa a készüléket saját maga, és ne végezzen rajta semmilyen beállítást. A készülék minden javítását vagy beállítását engedéllyel rendelkező szervizközpontban végeztesse el. A készülék megbontása a garanciaidő alatt a garancia érvényét veszítheti.
- Tartsa szabadon a szellőzőnyílásokat. Ne helyezze a készüléket puha felületre, ahol a nyílások elzáródhatnak.
- Ha a gyógyszeres pohár üres, ne működtesse a készüléket.

Inhalátor

- 1) Porlasztó
- 2) Gyógyszer tartály
- 3) Levegő vezeték
- 4) Szájrész
- 5) Bekapcsoló gomb
- 6) Cső csatlakozó
- 7) Félhold alakú vájat
- 8) Levegő szűrő, és fedél
- 9) Szellőzőnyílások
- 10) Tápkábel

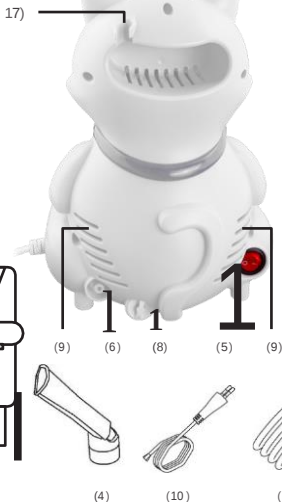

Porlasztókészülék

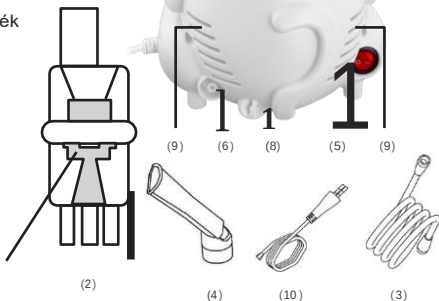

A KOMPRESSZOROS PORLASZTÓ MŰKÖDTETÉSE

Megjegyzés: Az első üzembe helyezés előtt a porlasztót alaposan meg kell tisztítani.

- Helyezze a kompresszoros porlasztót egy sima és stabil felületre. Ülve győződjön meg róla, hogy a kezelőszerveket könnyen elérheti.
- Óvatosan csavarja el a porlasztó felső részét az óramutató járásával ellentétes irányba a porlasztó szétszereléséhez.
- Töltse meg a porlasztó alsó részét az orvos által előírt gyógyszerrel. Ügyeljen arra, hogy a kúp az alsó részbe kerüljön.
- Óvatosan csavarja el a felső részt az óramutató járásával megegyező irányba, hogy a porlasztót újra összeszerelje. Ügyeljen arra, hogy a két rész jól illeszkedjen egymáshoz.
- Csatlakoztassa a levegőcső 3) egyik végét a porlasztó aljához.
- Illessze be a légcsővet 3) a félhold alakú horonyba 7). Győződjön meg róla, hogy a porlasztó stabilan áll a kompresszor felett.
- Csatlakoztassa a levegő cső 3) másik végét a kompresszor elején található csőcsatlakozóhoz.
- Csatlakoztassa a szájrészt 4) vagy az Ön által választott maszkot a porlasztó felső részéhez.
- Csatlakoztassa a tápkábelt egy megfelelő elektromos konnektorba. Győződjön meg arról, hogy ebben a szakaszban a hálózati kapcsoló a 'Off' st at us állásban van.
- Nyomja meg a hálózati kapcsolót az előírt kezelés megkezdéséhez.

Fontos:

A kompresszor motorja hővédővel rendelkezik, amely kikapcsolja a készüléket, mielőtt az túlmelegedne. Amikor a hővédő kikapcsolja a készüléket, kérjük:

+ Kapcsolja ki a készüléket.

+ Húzza ki a készüléket a konnektorból.

+ Újabb kezelés előtt várjon 30 percet, amíg a motor lehül. Győződjön meg róla, hogy a levegőnyílások nem akadályozzák. A kezelés befejeztével kapcsolja ki a készüléket, és húzza ki a konnektorból.

TISZTÍTÁS

Javasoljuk, hogy a porlasztót, és a maszkot minden használat után alaposan tisztítsa meg alaposan vízzel, és a nap utolsó kezelése után enyhe tisztítószerrel tisztítsa meg. Ha orvosa vagy légzésterapeutája más tisztítási eljárást ír elő, kövesse az utasításait.

Öblítés (minden kezelés után):

1. Csatlakoztassa le a levegő csövet 3) , a porlasztót, a szájrészt 4) és a maszkot.
2. Óvatosan csavarja meg a porlasztót, hogy kinyissa.
3. Öblítse ki vízzel a porlasztót, a szájrészt 4) és a maszkot.
4. Törölje meg őket tiszta puha törülközővel, vagy hagyja a levegőn megszáradni.
5. Szerelje össze újra a porlasztót, ha teljesen megszáradt, és tegye ezeket az alkatrészeket egy száraz, lezárt tárolóedénybe.

Fertőtlenítések:

Kérjük, kövesse a következő lépéseket a porlasztó fertőtlenítéséhez, hacsak orvosa másként nem rendelkezik. Javasoljuk, hogy a készüléket a napi utolsó kezelés után fertőtlenítsen.

- Használjon egy rész fehér ecetet három rész desztillált vízzel. Ügyeljen arra, hogy a kevert oldat elegendő legyen a porlasztó, a szájrész és a maszk elmerítéséhez.

- Végezze el az 1-3. öblítési lépést.

- Mossa ki a porlasztót, a szájrészt 4) és a maszkot meleg vízben és enyhe mosószerrel. Ezután mossa ki őket forró csapvízben.

- Merítse ezeket a részeket harminc percre az ecetes-vizes oldatba.

- Végezze el a 3-5. öblítési lépést. A kompresszor tisztítása :

- Naponta törölje át nedves ruhával.

- Ne használjon por állagú tisztítószereket vagy szappanos párnákat, mert azok károsíthatják a felületet. Szűrőcsere:

- Ne használjon pamutot vagy más anyagokat. Ne mossa vagy tisztítsa a szűrőt. Csak a forgalmazó által szállított szűrőket használja. Szűrő nélkül ne használja.

- Cserélje a szűrőt 30 naponta, vagy amikor a szűrő elszűrül.

TÁROLÁS

- Ne tárolja a készüléket közvetlen napfény, magas hőmérséklet vagy páratartalom alatt.

- Tartsa a készüléket kisgyermekek elől elzárva.

- Használaton kívül mindig tartsa a készüléket kihúzva.

MŰSZAKI ADATOK

Feszültség: 220V, 50 Hz Current: 0.8A

Gyógyszer kapacitás: 10 ml Particle Size: 0.5 to 10 um

Zaj tartomány :S 65 dBA

Átlagos porlasztási sebesség :S 0.4 ml / min

Kompresszor nyomástartomány: 28 la 55 Psi (200 la 380 KPa / 2 ta 3.8 bar)

Működési nyomástartomány: 9 ta 19 Psi (60 ta 130KPa / 0.6 ta 1.3 bar)

Áramlási tartomány 8UMin

Működési hőmérséklet-tartomány: 10° C ta 40° C (50° F ta 104°F)

Üzemi páratartalom tartomány: 10 to 95% RH

Hőmérséklet tartomány: -20° C la 70° C (-4°F la 158° F)

Tartozékok: Felnőtt maszk, gyermek maszk, szájrész.



MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

A gyártó:

Dongguan Topwell Medical Devices Company Limited
SF, Building A, No.68, Junma Road, Xinmalian Village, Dalang Town, Dongguan City, Guangdong Province,
523797, P.R.China.

Ezennel kijelentem, hogy:

A termék leírása: COMPRESSOR NEBULIZER Modellszám: TCN-02WU

megfelel az alábbi irányelvek és normák/szabványok alapvető követelményeinek és egyéb vonatkozó rendelkezéseinek:

93/42/EGK orvostechnikai eszközökre vonatkozó V. melléklet Kibocsátás éve (utolsó 2 számjegy): 15



MODELL-AZONOSSÁGI NYILATKOZAT

A gyártó:

Dongguan Topwell Medical Devices Company Limited
SF, Building A, No.68, Junma Road, Xinmalian Village, Oalang Town, Dongguan City, Guangdong Province,
523797, P.R.China.

ezennel kijelentjük, hogy a következő termék:

Termék leírás: A termék leírása: A termék megnevezése: COMPRESSION NEBULIZER Modellszám:
COMPRESSION NEBUUZER: TCN-02WU

technikailag megegyezik a következő termékkel, amelyet az EOC Poterek Sp. Jawnacompany:

Termék leírás: A termék leírása: A termék neve: COMPRESSION NEBULIZER Modellszám: COMPRESSION
NEBULIZER: ECN003

Védjegy: ESPERANZ



SZAVATOSSÁG

1. Ezt a szavatosságot az Esperanza Sp.j. Poterek adja ki az alábbi címmel: ul. Poznanska 129/133, 05-850 Ozarów Mazowiecki, Telefon: 022-7213571 w.10 - a továbbiakban Esperanza.
2. Ez a garancia Önnek konkrét jogokat és jogorvoslatokat biztosít az Esperanza ellen. Kérem, gondosan olvassa át ezt a dokumentumot, hiszen azáltal, hogy követelést nyújt be jelen garancia alapján, úgy tekintjük, hogy megértette és elfogadta a feltételeiket.
3. Esperanza garantálja, hogy bármely Esperanza termék a mellékelt tartozékaival együtt, normál használat során anyag- és gyártási hibától mentes.
4. Amennyiben igényt támaszt a garanciára, Esperanza, lehetőség szerint, minden hibás terméket kijavít vagy újra cserél, vagy új gyárilag felújított alkatrészeket használ.
5. Juttassa vissza a hibás termékeket a blokkal, kereskedelmi számlával vagy bármely más vásárlási bizonylattal együtt a vásárlás helyére. Minden, az eredeti dobozban lévő tartozékát tartalmaznia kell. Esperanza jogosult visszautasítani a garanciát, ha bármilyen tartozék hiányzik.
6. Esperanza kötelezettséget vállal arra, hogy a bejelentéstől számított 14 naptári napon belül válaszol a panaszra az értékesítés helyén. Esperanza a lehető legrövidebb időn belül megjavítja a hibás terméket. Amennyiben külföldről kell behozni a javításhoz szükséges alkatrészeket, úgy ez az idő meghosszabbítható.
6. A hibás termék újra cserélése esetén Esperanza jogosult arra, hogy a régivel megegyező technikai paraméterrel rendelkező, új modellt adjon, ha a garanciális idő alatt a régi modellt új váltotta fel
7. Jelen jótállás igénybevételével úgy veszik, hogy egyetértett azzal, hogy a javítás vagy (rendelkezésre állás esetén) csere, mely az itt leírt jótállási szolgáltatás keretében történik, az Ön egyetlen és kizárólagos jogorvoslata az Esperanzával szemben.

KIVÉTELEK: A garancia nem terjed ki az alábbiakra

1. Minden olyan termék, melyet nem az Esperanza gyártott
2. Minden olyan termék, melynek sérülése vagy hibás működése a következők egyikére vezethető vissza:
- a rendeltetészerű használattól eltérő bánásmód - átalakítás vagy belső beavatkozás vagy a terméken történt változtatás - nem Esperanza általi szerviz vagy javítás - helytelen tárolás, szállítás vagy csomagolás - a termék vagy szoftver helytelen telepítése - mechanikai, fizikai, kémiai stb. sérülések
3. Esperanza semmilyen esetben nem vonható felelősségre az Esperanza termékek más eszközökkel történő használatából adódó károsodásokért, üzletvesztésért, nyereség, adat vagy egyéb veszteségért.
4. Minden olyan termék, melynek eltávolították a garanciáját és más címkéit, és melyen durva használati nyomok látszanak.

Minden termékre 2 éves Esperanza gyártói garancia érvényes mindaddig, míg a terméket fogyasztó vásárolja (a fogyasztó olyan személy, aki a terméket nem szakmai vagy kereskedelmi tevékenység céljából vásárolja meg). Vállalati vásárlás esetén (szakmai vagy kereskedelmi tevékenységhez kapcsolódó célokra) a garancia a vásárlástól számított 1 év. Esperanza termékek az összes, EU-ban szükséges biztonsági tanúsítvánnyal rendelkeznek. A használt elektronikus termékek megsemmisítése Az elektronikai hulladékok megsemmisítéséről szóló európai direktíva 2002/96/EC előírja, hogy a használt elektromos eszközök nem dobhatók ki a háztartási hulladékkal együtt. A használt készülékeket külön

kell összegyűjteni, hogy optimalizálni lehessen a bennük lévő anyagok újrahasznosítását, és csökkenteni lehessen az emberi egészségre és környezetre gyakorolt hatásukat. A csomagoláson feltüntetett, áthúzott szemeset jelölés emlékezteti Önt arra, hogy ezt a készüléket a kijelölt gyűjtő helyen kell leadni. Lépjön kapcsolatba a helyi hulladékkezelő szolgáltatóval vagy a kereskedővel, a megfelelő megsemmisítés érdekében.