


INHALÁTOR WHIFF



ECN007

ALKATRÉSZEK LEÍRÁSA

- (1) Fő egység
- (2) Be/ki gomb
- (3) USB-C kábel csatlakozója
- (4) Felnőtt maszk
- (5) Gyermek maszk
- (6) USB-C kábel
- (7) Gumi védőkupak
- (8) Szájrész
- (9) Az inhalátor kioldógombja (PUSH gomb)
- (10) A gyógyszeres pohár zárja
- (11) Porlasztó egység
- (12) Gyógyszeres pohár
- (13) Háló
- (14) Aeroszol kimeneti fúvóka
- (15) gyógyszer bemeneti nyílás
- (16) Rezgőmotor (belül a gyógyszer bemeneti nyílásban, nem látható)
- (17) Elemtartó rekesz
- (18) Elektrodák
- (19) Alacsony gyógyszer szint-jelző
- (20) Működésjelző
- (21) Alacsony teljesítményjelző

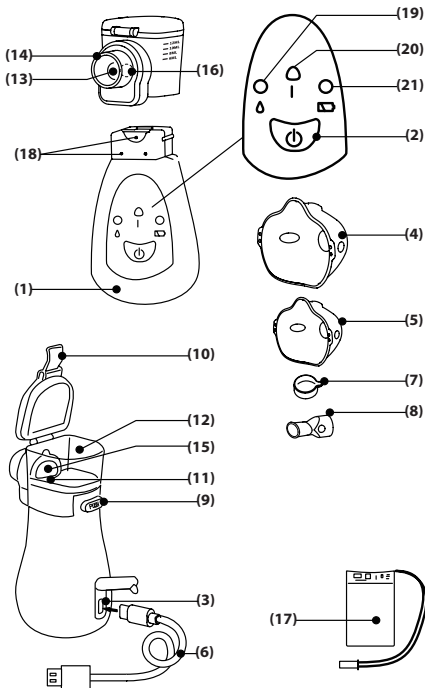

A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA

Töltse fel a lítium akkumulátort

Ez a készülék beépített lítium akkumulátorral rendelkezik. Javasoljuk, hogy hálózati adapterrel töltsen fel az akkumulátort az első használat alkalmával vagy hosszabb használaton kívüli használat után.

Emelje fel a C típusú USB-aljzat védősapkáját, amely a főegység hátulján található, csatlakoztassa a C típusú USB-kábelt az aljzatba, a másik oldalát pedig csatlakoztassa a hálózati adapterhez, majd csatlakoztassa a hálózathoz. A zöld üzemi jelző villog, a készülék megkezdte a töltést. A töltés befejeztével a zöld üzemi jelző villogása abbamarad. A töltés befejezése után húzza ki a hálózati adaptert a hálózathoz, és húzza ki az USB-kábelt. Tegye vissza a C típusú aljzatvédő sapkát.

Megjegyzések:

- Ha az alacsony töltöttségi szint jelzőfénye villog, az akkumulátor hamarosan lemerül. Az akkumulátort hamarosan fel kell tölteni.
- Ne használja a porlasztót töltés közben.
- A töltés befejezése után húzza ki a készüléket a konnektorból, ne csatlakoztassa sokáig a tápegységet.
- Ehhez a készülékhez ajánlott a megadott hálózati adapter használata.

Hogyan kell használni

- Nyomja meg a gyógyszeres pohár kioldógombját, és emelje fel.
- A fűvókát, a maszkokat meg kell tisztítani és fertőtleníteni az egység első használata előtt, vagy miután az egységet hosszabb ideig nem használta, vagy normál használat során naponta. A tisztítás és fertőtlenítés módja a „Tisztítás” és a „Fertőtlenítés” részben található.
- Húzza fel a zárat a gyógyszeres pohár kinyitásához.
- Töltse fel a gyógyszeres poharat gyógyszerrel, és zárja le a zárat.
- Tolja a porlasztó egységet a fő egységhez, amíg a helyére nem kattann.
- Emelje fel a C típusú USB-aljzat védősapkáját, amely a főegység hátulján található, csatlakoztassa a C típusú USB-kábelt az aljzatba, a másik oldalát pedig csatlakoztassa a hálózati adapterhez, majd csatlakoztassa a hálózathoz.
- Helyezze a maszkot vagy a szájrészt az aeroszolkiadó fűvókára.
- Nyomja meg a „be/ki” gombot, és a működésjelző zölden világít. A készülék elkezd működni.

Megjegyzés:

- A készülék 20 percig folyamatosan működik. Ezt követően a készülék automatikusan kikapcsol.
- Nyomja meg az „on/off” gombot az újbóli bekapcsoláshoz.
- Ha az akkumulátor lemerülőben van, az alacsony fogyasztásjelző narancssárga színben négyyszer felvillan, majd a készülék automatikusan kikapcsol.
- Amikor a gyógyszer beadása befejeződött, az alacsony gyógyszer szint-jelző 4-szer kéken felvillan, majd a készülék automatikusan kikapcsol.

Állítsa be a porlasztási sebességet

Ez a készülék 3 fokozatú porlasztási sebességgel rendelkezik: alacsony, közepes, magas. Nyomja meg a „be/ki” gombot, és a működésjelző zölden világít. A készülék elkezd működni. A legalacsonyabb porlasztási sebességen van, míg a zöld jelző kissé komor. Nyomja meg ismét a „be/ki” gombot, a porlasztási sebesség valamivel gyorsabb, míg a zöld jelzőfény világosabb. Nyomja meg újra a „be/ki” gombot, a porlasztási sebesség a leggyorsabb, miközben a zöld jelzőfény teljes fényben világít.

HOGYAN KELL BELÉLEGZNI

Figyelmeztetés: Csak az orvos által felírt és utasított típusú és mennyiségű gyógyszert használja.

- Enyhén döntse meg az egységet a háló helyzetébe. Ebben a helyzetben a vibrátor belemerül a gyógyszerbe, és a bekapcsolás után elindul a porlasztás.

Vigyázat: Bizonyos helyzetekben (például függőlegesen,) a porlasztás rövid időn belül leállhat. Ebben az esetben ismét röviden döntse meg az egységet, hogy a rezgőmotort ismét a gyógyszerbe merítse.

- Helyezze a szájrészt a szájába, vagy helyezze a maszkot a szájára és az orrára. Belégzéskor mindig legyen nyugodt és laza. Lélegezz be mélyen, hogy a gyógyszer mélyen bejusson a hörgőkádákba. Rövid ideig tartsa vissza a lélegzetét, majd lassan lélegezzen ki, miközben eltávolítja a szájrészt. Ne lélegezzen túl gyorsan. Tartson egy kis szünetet, amikor úgy érzi, hogy pihennie kell. Szinkronizálhatja a porlasztást a belégzési/kilégzési ciklusokkal, ha a készüléket kézi porlasztási módban használja.

AZ EGYSÉG TISZTÍTÁSA

Megjegyzés: ha a készüléket nem tisztítja és fertőtleníti megfelelően és gyakran, mikroorganizmusok maradhatnak a készülékben, fertőzésveszélyt okozva.

Gyógyszeres pohár tisztítása

1. Vegye le a maszkot/szájrészt a főegységről.
2. Vegye ki a gyógyszeres poharat a fő egységből:
3. Nyissa ki a gyógyszeres pohár zárját, dobja ki a gyógyszermaradványokat.
4. Öntsön tiszta hideg csapvizet a gyógyszeres pohárba, hogy eltávolítsa a vibrátor lyukaiban maradt gyógyszert. De NE merítse vízbe a porlasztó egység más részét, kivéve a gyógyszertartály belsejét.

Automatikus mélytisztítás

A porlasztó csatornáiban vagy a porlasztó hálóján maradt gyógyszermaradványok alaposabb eltávolítása érdekében ez a készülék automatikus mélytisztító funkcióval rendelkezik.

A fenti 4 tisztítási lépés után. Öntsön újra tiszta hideg csapvizet, zárja le a tartály zárját. Nyomja meg és tartsa lenyomva a „be/ki” gombot 4 másodpercig, a készülék megkezdte a tisztítást, miközben a zöld jelzőfény felváltva sötéten és világosan világít. Ez az öntisztulási folyamat 2 percig tart. A folyamat befejezése után a készülék automatikusan kikapcsol. Öntse le a felesleges vizet. Hagyja a tartályt levegőn megszáradni egy tiszta, szőszmentes törülközőn vagy papíron.

A porlasztó egység, a háló és a fő egység tisztítása

- Ne érintse meg a hálót vattacsomóval vagy tűvel.
- Tisztítsa meg a főegységet, a hálót, a főegységet és az elektródákat (megnedvesített) gézzel. Ne használjon illékony anyagokat, például benzint vagy hígítót.

A KÉSZÜLÉK FERTŐTLENÍTÉSE

Megjegyzés: ha a készüléket nem tisztítják és fertőtlenítik megfelelően és a jelzett gyakorisággal, mikroorganizmusok maradhatnak az egységben, fertőzésveszélyt okozva.

- A fűvókát, a maszkokat fertőtleníteni kell az egység első használata előtt, vagy miután az egységet hosszabb ideig nem használta, vagy normál használat során naponta.
- A fertőtlenítés alkohollal történhet. Áztassa a maszkokat és a szájrészt 70%-os etil-alkoholba kb.1 percig. Rázza le a felesleges alkoholt az alkatrészekről, és hagyja őket levegőn megszáradni egy tiszta, szőszmentes törülközőben vagy papíron.
- A fertőtlenítés ecettel is végezhető. Használjon egy rész fehér ecetet három rész desztillált vízzel hígítva. Győződjön meg arról, hogy a kevert oldat elegendő a szájrész és a maszkok alámerítéséhez. Rázza le a felesleges oldatot az alkatrészekről, és hagyja őket levegőn megszáradni egy tiszta, szőszmentes törülközőben vagy papíron.

